



Allgemeine Hinweise für den Einsatz von BeHi Pro

1.	Erstellen Sie ein Nutzerprofil mit dem erhaltenen Einladungscode, notieren Sie sich die Wiederherstellungswörter und verwahren Sie diese an einem sicheren Ort . Die Wörter repräsentieren einen kryptografischen Schlüssel, der zum Wiederherstellen Ihres Profils (z.B. im Fall eines beschädigten iPads oder iPhones) verwendet wird. Auch die Ruma GmbH kann Ihr Profil und die Daten unter keinen Umständen wiederherstellen, sollten Sie die Wiederherstellungswörter verlieren.	
2.	Weisen Sie den probengebenden Personen einen oder auch mehrere Marker zu. Achten Sie sorgfältig darauf, den richtigen Probengebenden den richtigen Marker zuzuweisen, um spätere Verwechslungen auszuschließen.	
3.	Übergeben Sie der probengebenden Person die vorher zugewiesenen Marker und achten Sie sorgfältig darauf, dass es sich tatsächlich um die richtigen und zugewiesenen Marker handelt.	
4.	Fordern Sie zum gewünschten Zeitpunkt eine Urinprobe bei den Probengebenden an. Achten Sie darauf, die richtigen Probengebenden zur Urinprobenabgabe aufzufordern und dass diesen Probengebenden auch Marker zur Einnahme zugewiesen wurden und mindestens einer zur Einnahme verfügbar ist.	
5.	Sie werden benachrichtigt, sobald ein Einnahmevideo aufgenommen wurde. Validieren Sie das Einnahmevideo und achten Sie darauf, dass in dem Video die korrekte probengebende Person den Marker einnimmt. Überprüfen Sie die korrekte Einnahme des Markers anhand des Videos und bewerten Sie die Markereinnahme mit „Einnahme OK“, „Fehlversuch“ oder „Manipulation“ und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Das Bewertungsergebnis ist nun gespeichert. Die Bewertung kann jederzeit korrigiert werden.	
6.	Die Probengebenden werden nun darüber informiert, dass das Video bewertet wurde, nicht aber über das Bewertungsergebnis. Bei einer Manipulation der Markereinnahme Prüfen Sie die Laborergebnisse.	
7.	Bei einer erkennbaren Manipulation oder einem Fehlversuch muss die Urinprobe nicht mehr analysiert werden, da die Ergebnisse zweifelhaft sind.	