

BeHi Pro

Kurzanleitung für die Bewährungshilfe

(für Version 1.1)

Ruma® BeHi (Pro) ist eine Adaption von Ruma® Digital-System (Pro) für die Bewährungshilfe.

CE Ruma® Digital-System (Pro) ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt

1 Quick-Start BeHi Pro	3
1.1 Eine Bewährungshilfe-Identität erstellen	3
1.2 Probengebende anlegen	5
1.3 Probengebenden-Telefon verknüpfen.....	7
1.4 Einer probengebenden Person einen Marker zuweisen ..	10

Um die Apps auszuprobieren, müssen Sie von uns den Zugang freigeschaltet bekommen. Hierzu versenden wir an Sie Test-Sets sowie Einladungscode. Sie können mit den Sets und den Einladungscode den gesamten Prozess von BeHi (Pro) durchspielen, inkl. der Kapseleinnahme. Sobald ein Einladungscode verwendet wurde, wird er ungültig, somit steht er nur einmalig zu Verfügung.

Sie benötigen zur Simulation der Nutzung der Sets zwei unterschiedliche Apps:

1. Die Ruma-App "BeHi" auf ein **Smartphone (App Store und Play Store)** laden. Hiermit simulieren Sie die probengegebende Person.
2. Die Ruma-App "BeHi Pro" auf ein **iPhone oder iPad**. Hiermit simulieren Sie den Fachanwender. BeHi Pro ist über das Device Management der Justiz Bayern erhältlich.

Um die App BeHi Pro einzurichten, benötigen Sie den Einladungscode, den wir Ihnen zugesendet haben. Nachdem Sie sich unter Verwendung des Einladungscode eine Identität angelegt haben, erscheint eine Maske mit 12 zufälligen, englischen Worten. Bitte bewahren Sie diese 12 Worte unbedingt auf (machen Sie sich z.B. ein Foto davon). Sie benötigen diese 12 Worte, wenn Sie später Ihre Identität wiederherstellen wollen, z.B. im Rahmen eines Umzuges auf ein anderes Tablet oder iPhone.

Die aktuelle Software-Version von BeHi (Pro) entnehmen Sie bitte dem Menü in der rechten ober Ecke der jeweiligen Anwendung.





Über das Device Management der Justiz Bayern stehen Ihnen auch Updates zu Verfügung. Falls Sie in Ihren Einstellungen automatische Updates aktiviert haben sollten, werden die Updates automatisch installiert.

1 Quick-Start BeHi Pro

1.1 Eine Bewährungshilfe-Identität erstellen

Zur Nutzung von BeHi Pro müssen Sie zunächst eine sogenannte „**Identität**“ anlegen, mit der Sie innerhalb der App arbeiten. Jeder Fachnutzer innerhalb einer Einrichtung der Bewährungshilfe benötigt eine eigene Identität, um eine Zuordnung probengebender Personen zu individuellen Bewährungshelfenden zu gewährleisten. Sie können den Namen dieser Identität frei wählen.

Um eine Identität anzulegen, wählen Sie nach dem Start von BeHi Pro „**Neue Identität hinzufügen**“. Daraufhin öffnet sich ein Sicherheitsdialog, der darauf hinweist, dass die Verwendung der App nur auf Geräten gestattet ist, die ausschließlich für einrichtungsbezogene Zwecke verwendet werden. Nach Akzeptieren wählen Sie „**Anmelden als Bewährungshilfe**“ → „**Neue Identität erstellen**“.

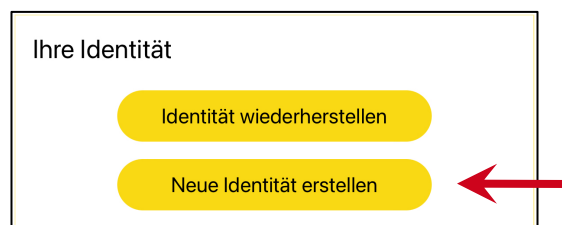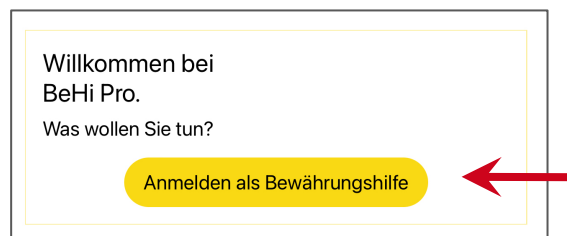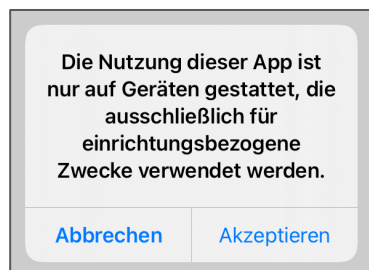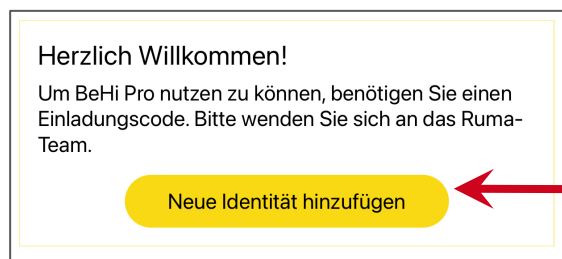

In der folgenden Eingabemaske können Sie nun Ihre Identität anlegen. Beim Anlegen einer neuen Identität werden Ihnen 12 zufällig ausgewählte Wörter angezeigt, die Sie nicht ändern können. Alle 12 Wörter zusammen stellen Ihre ganz persönliche Wiederherstellungsinformation dar. Im Falle eines Verlusts oder Defekts des Tablets oder iPhones können Sie allein mit diesen Wörtern Ihr Profil auf jedem anderen Gerät mit BeHi Pro wiederherstellen. Auch wenn Sie die App auf einem zusätzlichen Gerät nutzen möchten, benötigen Sie die angezeigten Wörter. Eine Identität kann auf mehreren Tablets bzw. iPhones genutzt werden.

Verlieren Sie diese 12 Wörter, kann Ihre Identität im Verlustfall nicht wiederhergestellt werden. Notieren Sie daher diese **in der angegebenen Reihenfolge** und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, sodass sie für andere nicht zugänglich sind.

Neue Identität anlegen

Bitte notieren Sie sich folgende Wörter:

Wort 1	Wort 2
buzz	bless
Wort 3	Wort 4
attack	salute
Wort 5	Wort 6
betray	test
Wort 7	Wort 8
jewel	large
Wort 9	Wort 10
rabbit	virtual
Wort 11	Wort 12
erase	fly

Einladungs-Code

Name der Identität

E-Mail-Adresse

Passwort zum Schutz Ihrer Identität:
Passwort

Passwort wiederholen

Identität erstellen

Die hier angezeigten 12 Wörter stellen Ihr individuelles Wiederherstellungspasswort dar. Notieren Sie die Wörter in der angegebenen Reihenfolge und bewahren Sie sie sicher auf.


Die Wörter sind stets in englischer Sprache.

Füllen Sie nun noch die folgenden Felder aus.

<u>Einladungs-Code:</u>	Tragen Sie hier den Einladungs-Code ein, den Sie von Ruma zum Freischalten der App erhalten haben.
<u>Name der Identität:</u>	Geben Sie hier den Namen der Identität ein, z.B. Ihren Namen.
<u>E-Mail:</u>	Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an. Sie werden über diese Adresse informiert, sobald neue Einnahmevideos bei Ihnen eingegangen sind.
<u>Passwort zum Schutz der Identität:</u>	Ein frei von Ihnen gewähltes Passwort (mind. 8 Zeichen, muss Klein-, Großbuchstaben und mindestens eine Zahl enthalten) zum Anmelden Ihrer Arzt-Identität in BeHi Pro.
<u>Passwort wiederholen:</u>	Wiederholen Sie hier zur Prüfung Ihr gewähltes Passwort.

Sollte eine der Eingaben ungültig sein, wird dies durch einen entsprechenden Hinweis angezeigt.

Wählen Sie nun „**Identität erstellen**“. Dies wird durch den Hinweis „Identität wird erstellt...“ angezeigt. Schließen Sie währenddessen nicht die App.

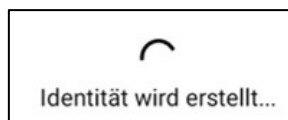


Nachdem die Identität erstellt wurde, gelangen Sie automatisch zum Startbildschirm zurück. Sie können sich nun mit Ihrer neuen Identität anmelden.

1.2 Probengebende anlegen

Probengebende Personen können durch die Bewährungshilfe-Identität angelegt und verwaltet werden.

Neue Probengebende können in der Probengebenden-Liste angelegt werden. Nach dem Einloggen als Bewährungshilfe-Identität gelangen Sie automatisch in diese Listenansicht. Sie können andernfalls auch über das Menü in der linken oberen Ecke in die Probengebenden-Liste gelangen.

Um ein Probengebenden-Profil anzulegen, wählen Sie in der Probengebenden-Liste den Punkt "**Neue probengebende Person erstellen**".

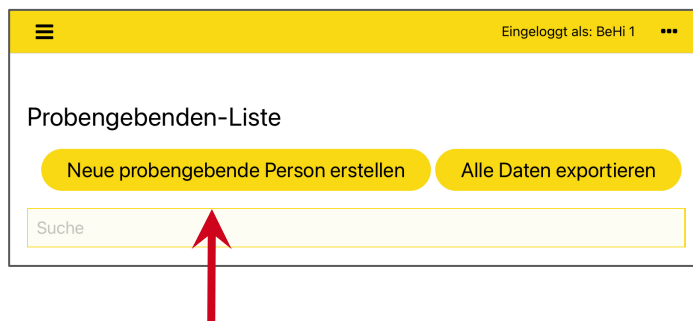

Im folgenden Fenster können Sie die Daten der probengegebenden Person eingeben.

Probengegebende Person anlegen

Bezeichnung

Foto:
Noch kein Foto vorhanden.

Foto hinzufügen

Probengegebende Person speichern

Abbrechen

Bezeichnung:

Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung der probengegebenden Person ein, z.B. Kürzel und Geburtsdatum oder eine interne Probengebenden-Nummer. Sollte die gewählte Bezeichnung bereits bei einer vorherigen probengegebenden Person verwendet worden sein, werden Sie von der App darauf hingewiesen. Achten Sie auf genügend Unterscheidungsmerkmale, um eine Dopplung der Bezeichnung zu vermeiden.

Wenn Sie im Probengebenden-Profil ein Bild speichern möchten, wählen Sie **"Foto hinzufügen"** zur Aufnahme des Probengebenden-Bildes.

Probengegebende Person anlegen

Bezeichnung

Probe Geber 1

Foto:



Foto ersetzen

Foto löschen

Probengegebende Person speichern

Abbrechen

Nachdem Sie die Bezeichnung eingegeben und ggf. auch ein Foto aufgenommen haben, wählen Sie **"Probengegebende Person speichern"**.

Nach der Speicherung sehen Sie den neu angelegten Probengegebenden in der Probengegebenden-Liste. Sie können nun weitere Probengegebende anlegen.

1.3 Probengegebenden-Telefon verknüpfen

Damit eine probengegebende Person Einnahmevideos aufnehmen kann, muss diese ihr Smartphone einmalig mit dem Tablet/iPhone bzw. BeHi Pro verknüpfen. Auf diese Weise wird eine sichere Verknüpfung zwischen den Endgeräten hergestellt, sodass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Bewährungshelfer und probengegebender Person ermöglicht wird. Das Verknüpfen des Probengegebenden-Telefons erfolgt mit Hilfe eines QR-Codes.

Wählen Sie in der Probengegebenden-Liste bei dem zu verknüpfenden Probengegebenden **"Mehr"** → **"Verknüpfen"** aus.

<

☰

Eingeloggt als: BeHi 1

⋮

Probengegebenden-Liste

Neue probengegebende Person erstellen

Alle Daten exportieren

Suche

Probe Geber 1

verknüpft am -


Datenschutz akzeptiert: -

Datenschutz widerrufen: -

Marker zuweisen

Nachricht

Mehr

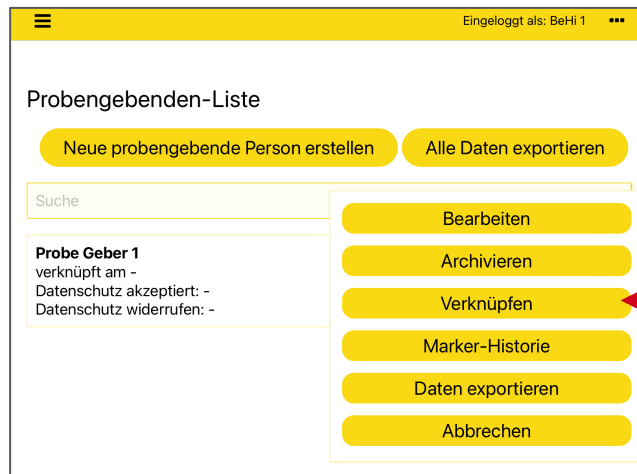


BeHi Pro zeigt nun einen QR-Code an, den die probengebende Person mit der BeHi App auf dem Smartphone der probengebenden Person scannt.



Dazu startet die probengebende Person auf ihrem Smartphone die Probengebenden-App BeHi und wählt "**Kopplung starten**". Daraufhin muss der oder die Probengebende in die Datenschutzerklärung einwilligen. Dies erfolgt durch Wählen des Buttons „Akzeptieren“. Zum Anzeigen der Datenschutzerklärung wählt die probengebende Person „Datenschutzerklärung lesen“. Nach Akzeptieren der Datenschutzerklärung wird die Kamera des Smartphones aktiviert. Der in der Bewährungshilfe-App BeHi Pro auf dem Tablet bzw. iPhone der Bewährungshilfe angezeigte QR-Code kann nun mit dem Smartphone der probengebenden Person gescannt werden.

Die folgenden Bilder zeigen die Ansicht innerhalb von BeHi.

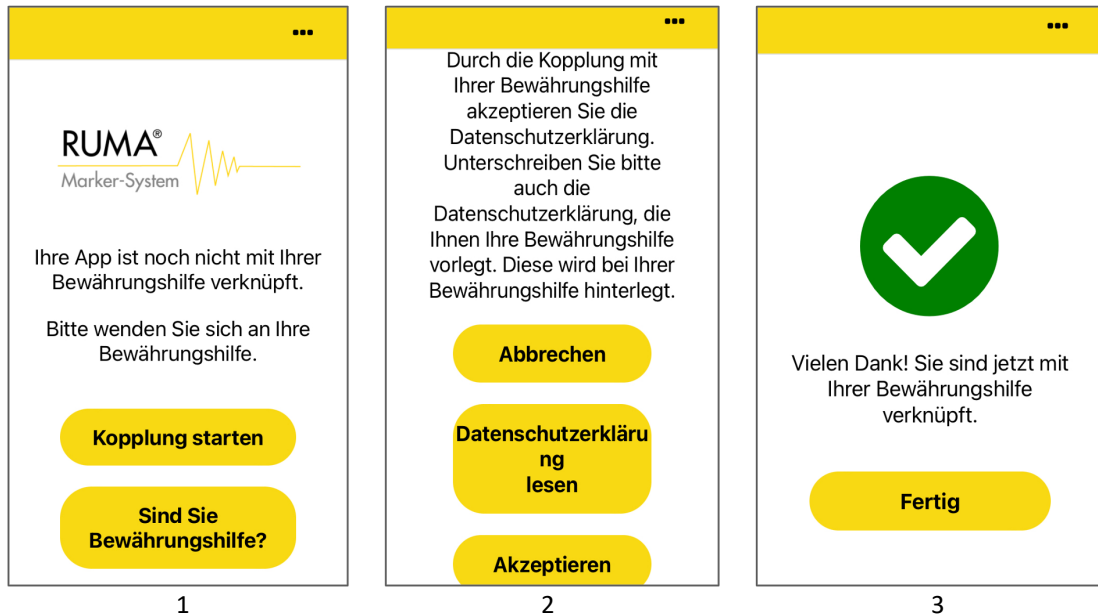

Die erfolgreiche Verknüpfung des Probengebenden-Smartphones wird mit einer entsprechenden Meldung quittiert. Wählen Sie "**Fertig**" um den Vorgang abzuschließen.


Die probengegebende Person ist nun mit ihrem Smartphone mit BeHi Pro bzw. dem Tablet/iPhone des bzw. der Bewährungshelfenden verknüpft. Alle vom/von der Probengebenden gesendeten Daten sind nur noch und ausschließlich vom/von der Bewährungshelfenden einsehbar. Auch die Ruma GmbH hat keinen Zugriff auf die Daten.

HINWEIS: Die Kopplung erfolgt unabhängig von der Telefonnummer, die die probengegebende Person auf dem gekoppelten Gerät nutzt. Eine erneute Kopplung ist nicht erforderlich, wenn der bzw. die Probengebende z. B. den Provider wechselt und das Smartphone behält. Wird das Smartphone gewechselt, so muss ggf. die Kopplung neu durchgeführt werden.

In BeHi Pro erfolgt keine gesonderte Bestätigung der erfolgreichen Verknüpfung. Wählen Sie "**Fertig**" um zurück in die Probengebenden-Liste zu gelangen.



Die Verknüpfung ist nun in der Probengebenden-Liste beim entsprechenden Probengebenden unter Angabe des Datums vermerkt. Außerdem wird das Datum der Einwilligung in die Datenschutzerklärung in der Probengebenden-Liste mit aufgeführt. Sollte der bzw. die Probengebende seine/ihre Einwilligung nachträglich zurückziehen, wird auch dies in der Probengebenden-Liste vermerkt. In diesem Fall können keine Marker mehr zugewiesen oder Nachrichten geschickt werden.

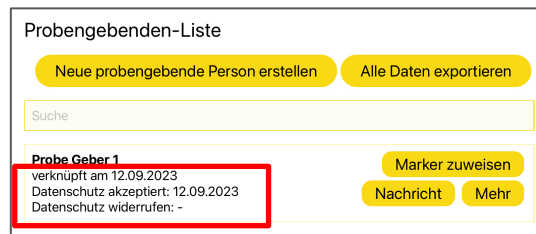

Die Funktionen der Probengebenden-App BeHi werden in einem gesonderten Handbuch für Probengebende erklärt.

Sollte eine probengebende Person ihr verknüpftes Smartphone verlieren, kann die Verknüpfung mit einem anderen Smartphone wiederholt werden. In der Probengebenden-Liste wird dann das Datum der letzten Verknüpfung angezeigt.


1.4 Einer probengebenden Person einen Marker zuweisen

Damit eine probengebende Person ein Einnahmevideo aufnehmen kann, muss dieser ein Marker zur Benutzung zugewiesen werden. Erst dann ist dieser Marker für diese probengebende Person in BeHi nutzbar.


Die Zuweisung eines Markers kann nur in BeHi Pro erfolgen. Dies geschieht mittels des auf der Marker-Verpackung aufgedruckten QR-Codes. Jedes Marker-Set trägt einen einzigartigen QR-Code. Nach der Benutzung können der QR-Code und somit der Marker nicht ein zweites Mal verwendet werden.

Wurde einer probengebenden Person kein Marker zugewiesen, kann diese innerhalb der Probengebenden-App keine Videos aufnehmen.

Wählen Sie die Ansicht der Probengebenden-Liste. Wählen Sie beim entsprechenden Probengebenden den Punkt **"Marker zuweisen"** aus.

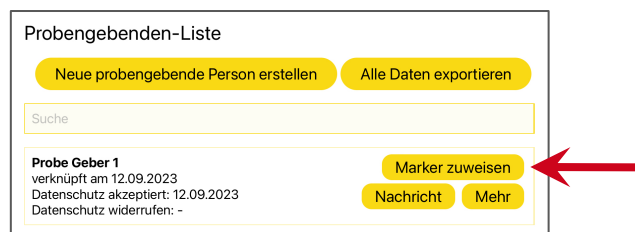

Das Tablet wechselt in den Kameramodus. Scannen Sie nun den QR-Code der Marker-Verpackung.

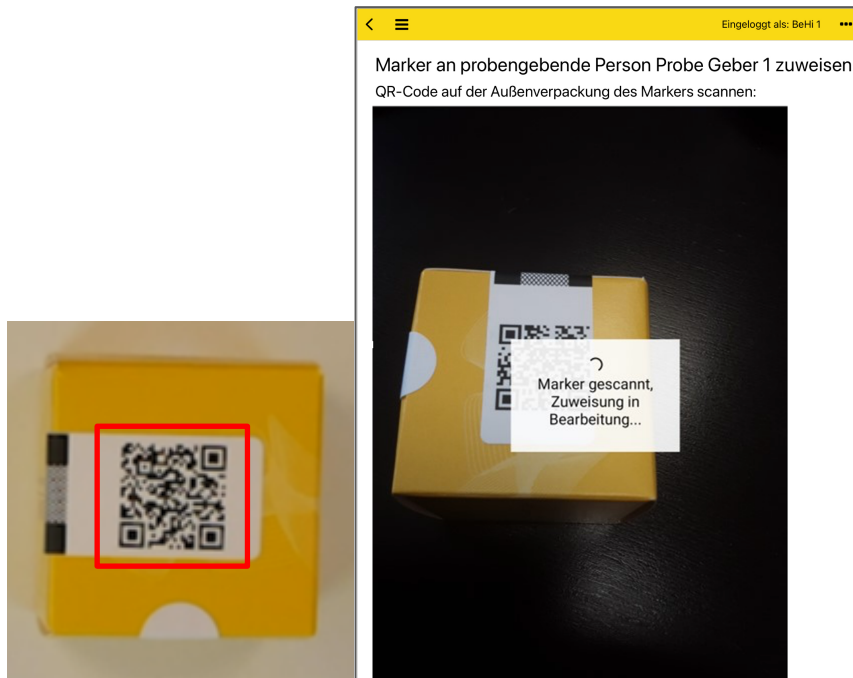

Scannen Sie den QR-Code auf der Außenverpackung (Kartonage) des Markers. Dadurch wird dieser Marker dem/der ausgewählten Probengebenden zugewiesen.

Den Namen des/der ausgewählten Probengebenden können Sie oben ablesen. Sobald der Marker zugewiesen wurde, ist er nur durch diese probengebende Person nutzbar.

Nach erfolgreichem Scannen erscheint der Hinweis **"Dieser individuell codierte Marker wurde dieser probengebenden Person zugewiesen"** für einige Sekunden im Display. Der Marker ist nun zur Einnahme durch die ausgewählte probengebende Person freigegeben.

Dieser individuell codierte Marker wurde dieser probengebenden Person zugewiesen.

Falls der QR-Code ungültig oder der Marker bereits zugewiesen worden sein sollte, wird eine entsprechende Nachricht angezeigt.

Sollte der bzw. die Probengebende seine/ihre Einwilligung in die Datenschutzerklärung widerrufen, steht die Funktion „Marker zuweisen“ nicht mehr zur Verfügung.